




Kurze Anleitung – Schnelltest

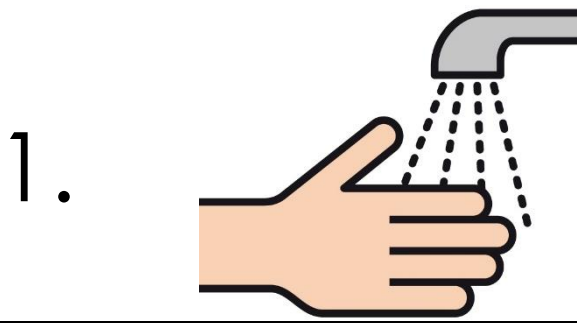

Hände waschen und alles vorbereiten.

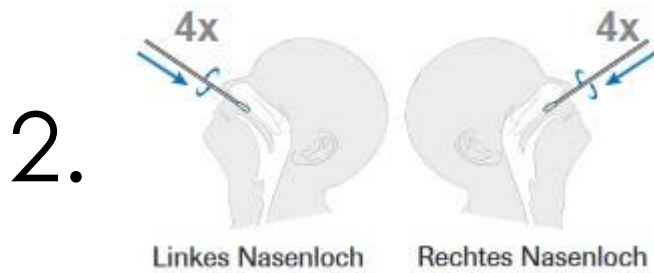

Tupfer 4x links in der Nase **und** 4x rechts in der Nase drehen. Immer **2 cm** tief!

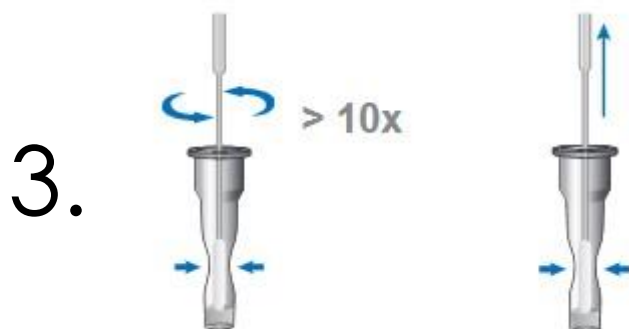


- Tupfer in Röhrchen.
- Röhrchen zusammendrücken
- 10x Tupfer drehen.
- Beim Rausnehmen nochmal Tupfer fest in Röhrchen zusammendrücken.




Deckel auf Röhrchen stecken.

5.

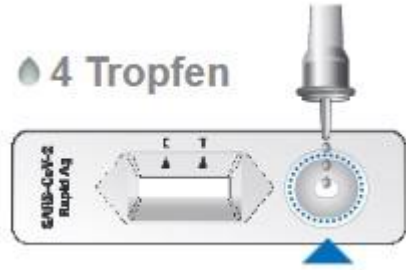


Genau 4 Tropfen auf das runde Feld tropfen.

6.

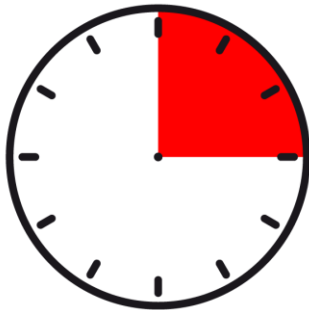

15 Minuten warten. Dann Testergebnis ablesen:

7.

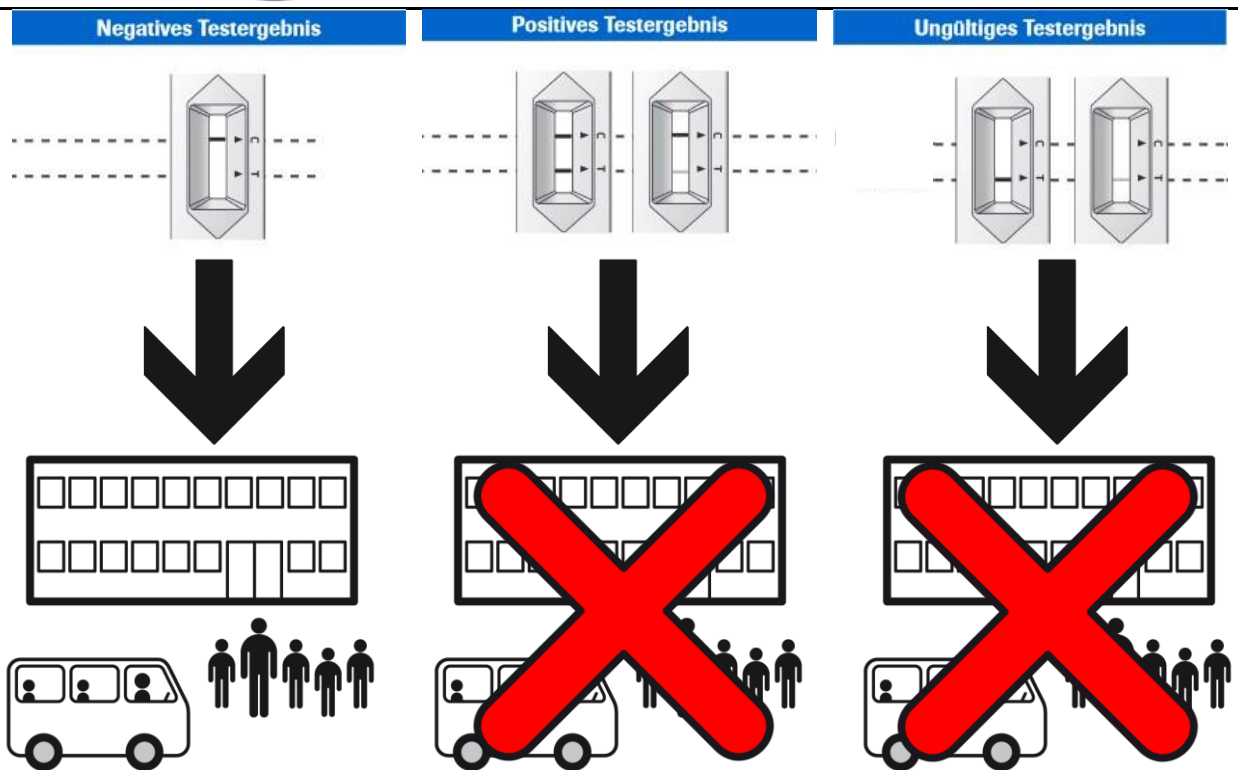

Hammerwald-
schule
06045 / 95 38 81